

## Orientação para Coleta e Envio de Material para o Laboratório

### COLETA DE AMOSTRAS

As amostras devem estar colhidas dentro da padronização de tubos e deverá vir acompanhada da requisição do médico veterinário. O Laboratório Santa Cecília fornece os tubos e frascos para coletas.

### CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

As amostras são transportadas em caixas refrigeradas para evitar a sua degradação. É muito importante manter o material refrigerado.

### RESULTADOS

Os resultados das análises de rotina são comunicados em um prazo de 24 horas, desde a chegada das amostras ao laboratório. As seguintes modalidades poderão ser utilizadas para obtenção destas informações:

**Telefone - Fax - Correio - E.mail - Entrega Direta.**

### ASSESSORIA TÉCNICA

O Laboratório Santa Cecília dispõe de veterinária especialista em diferentes áreas da clínica veterinária e com ampla experiência laboratorial, apta a auxiliá-lo nos diversos desafios diários.

**Serviço disponível de 2º a 6º feira via E.mail ([veterinaria@labsantacecilia.com.br](mailto:veterinaria@labsantacecilia.com.br))**

### BIBLIOGRAFIA

A Biblioteca do Laboratório Santa Cecília possui uma extensa bibliografia atualizada que poderá ser consultada para obter informações e dados técnicos.

### ORIENTAÇÃO PARA COLETA EM TUBOS A VÁCUO



#### **TUBO TAMPA ROXA - EDTA:**

HEMOGRAMA COMPLETO, PESQUISA DE HEMOPARASITAS.



#### **TUBO TAMPA CINZA - FLUORETO:**

GLICEMIA DE JEJUM, CURVA DE TOLERANCIA A GLICOSE.



#### **TUBO TAMPA AZUL - CITRATO:**

COAGULOGRAMA, TEMPO DE PROTROMBINA, FIBRINOGENIO, PTT.



#### **TUBO TAMPA VERDE - HEPARINA:**

PESQUISA DE HEMATOZOÁRIOS EM FELINOS.



#### **TUBO TAMPA VERMELHA - SEM ANTICOAGULANTE:**

SOROLOGIAS (MG, NDV, ETC) URÉIA, CREATININA, TGO, TGP, ÁCIDO URICO, FOSFATASE ALCALINA, LÍPIDES, PROTEÍNAS.

